



INDIVIDUALNI SJEDNI SUSTAV U VAKUUMSKOJ TEHNOLOGIJI

Individualni sjedni sustav u vakuumskoj tehnologiji primjenjuje se kod korisnika koji imaju česte promijene u funkcionalnom statusu i kod djece koja su u intenzivnoj fazi rasta i razvoja. Sustav se primjenjuje za sprečavanje odnosno usporavanje progresije deformacija sustava za pokretanje.

Ova vrsta opskrbe primjenjuje se u Hrvatskoj već duži niz godina a povratne informacije koje dobivamo od pacijenata i stručnoga kadra iz specijaliziranih ustanova za rehabilitaciju su više nego pozitivne, vezano za korist i pomoć pri pozicioniranju. Sustav je sve prisutniji u propisivanju od strane liječnika specijalista a ujedno je u sustavu pomagala HZZOa

Cijeli proces savjetovanja, propisivanja, odabira komponenti i same prilagodbe dio je timskog procesa koji se odvija između liječnika specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i liječnika ortopeda, fizioterapeuta, radnog terapeuta i stručne osobe od strane ugovornog isporučitelja. Korisnik odnosno pacijent ključni je dio tima i ujedno je u centru tima. Osim medicinske dokumentacije i administracije potrebno je napraviti dobru procjenu stanja korisnika, njegove navike i način života te uočiti i procijeniti teren na kojem se kreće. Ako se radi o djetetu potrebno je saslušati njegove želje i mogućnosti, ujedno i želje roditelja ili staratelja.

**ŠIFRA POMAGALA sa popisa
pomagala HZZO-a: 122103071301**



PROCES

- Doznaku propisuje liječnik fizijatar u suradnji sa liječnikom ortopedom – timski (potrebno je priložiti nalaz ortopeda) u istoj specijaliziranoj ustanovi. Doznaku ovjerava liječničko povjerenstvo direkcije HZZO-a.
- Dolazak ugovornog isporučitelja za uzimanje mjera i dogovor o opskrbi, upoznavanje sa procedurom, savjetovanje o pozicioniranju i pomagalu
- Isporuka pomagala od strane stručne osobe ugovornog isporučitelja, edukacija o korištenju pomagala, pozicioniranje i prilagodba pomagala prema pacijentu.



UZIMANJE MJERA



Uzima se mjera u korektivnom rasterećenom položaju tijela u kojem se pacijent osjeća sigurno i sa što manje bolova. Prema uzetim mjerama izrađuju se neoprenski jastuci punjeni Polistirolom i zrakom. Nakon izrade jastuka i odabira podvozja sjednog sustava, sistem jastuka dodatno modeliramo dodavanjem i oduzimanjem zraka te u potpunosti tada prilagodimo sustav tijelu te fiksiramo jastuk vakuum metodom. Sjedište je specifično po tome što možemo u bilo kojem trenutku otpustiti vakuum oblik i promijeniti otisak prema nekim drugim zahtjevima tijela pacijenta., što znači da korisnik s vremena na vrijeme može otisak u jastuku promijeniti te na taj način mijenjati poziciju tijela u jastuku.

Upotrebom ovoga sustava postiže se smanjenje pritiska tijela na način da se pritisak raspoređuje na veću površinu. Upravo radi toga ovo rješenje opskrbe se primjenjuje kod pacijenata sa većim deformacijama u trupu i sa povećanom sklonosti ka natiscima i dekubitusu. Ujedno i kod pacijenata koji već imaju natiske ili dekubitus na način da se zahvaćeni dio rastereti i oslobodi pritiska izmicanjem ispunne materijala.

Vakuuform sustav osigurava ujedno potporu onog dijela tijela gdje deformitet to ne dozvoljava. Deformiteti se popunjavaju za rasterećenje ili oslobađaju pritiska i na taj način radi se na normalizaciji tonusa mišića, ublažavanju bolova i progresije deformacije. Poboljšanom pozicijom tijela dobivenom ovom opskrbom pacijent smanjuje eventualno prisutnu bol, bolje diše, pozicioniranjem glave i vrata lakše guta te još niz drugih učinkovitosti.



Polistirol

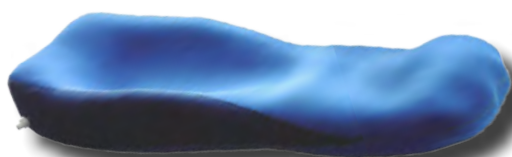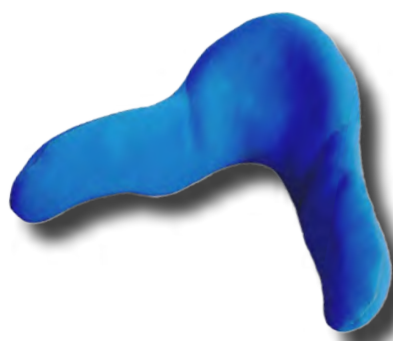


Prednosti individualne i modularne opskrbe Vakuuform:

- Mogućnost višekratnog pozicioniranja prema potrebama u dužem vremenskom periodu
- Praćenje rasta i razvoja kod djece
- Praćenje promjene statusa kod odraslih (debljanje, mršavljenje)
- Vrlo ugodan materijal i pogodan za lako oblikovanje (protuklizna svojstva)
- Presvlaka sjedišta je periva
- Odabir podvozja prema potrebama i željama korisnika sa mogućnošću sklapanja

PRIMJERI OPSKRBE



**Mogućnost odabira
presvlaka**

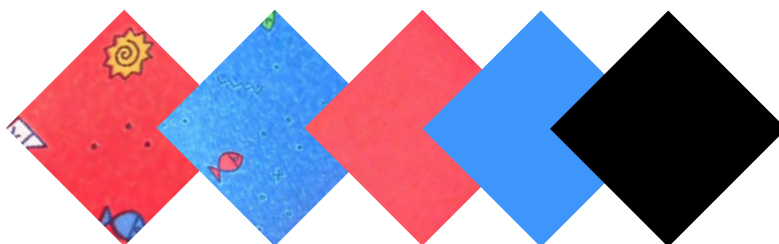

Ciljevi opskrbe:

- Rasterećenje i stabilizacija tijela
- Sprečavanje ili usporavanje progresije deformacije
- Izmjena položaja prema potrebi



U suradnji sa liječnicima, fizioterapeutima i ostalim stručnim timom uspjeli smo kod pacijenata usporiti progresije deformacija, djelomično normalizirati tonus, omogućiti rasterećenje i smanjiti bolove uz ostale učinke kao što su poboljšano disanje i gutanje. Prepoznali smo prednosti ovakve opskrbe i postali smo još jedna od zemalja koja je uvela ovakav sustav opskrbi.

Naša opskrba je timski orijentirana, u njoj sudjeluju stručnjaci iz područja ortopedije, fizikalne medicine i rehabilitacije, fizioterapeuti, radni terapeuti, obitelj, učiteljica i naravno sam korisnik koji je centar tima.

U suradnji sa:

 **VAKUFORM®**


Yes, you can.™

Stručno savjetovanje sa fizioterapeutom: 091/2444-504



www.ortorea.hr
e: info@ortorea.hr

INKO CENTAR

www.inkocentar.hr
e: info@inkocentar.hr

VELEPRODAJA - Orto Rea

Varaždin | Braće Radić 52/B, Jalkovec 042/350-744

MALOPRODAJE - Orto Rea

Varaždin | Braće Radić 52/B, Jalkovec 042/659-975

Zagreb | Petrova 47 01/638-2262

Osijek | Ulica Franje Krežme 22 031/586-596

Varaždinske Toplice | Trg Slobode 1 042/205-503

Rijeka | Ivana Žorža 39/3 051/635-409

INKONTINENTNI CENTAR

ZADAR | N. Š. Zrinskog 7 023/301-777

SPLIT | Lovretska 27 021/485-166