



UPUTE ZA ODRŽAVANJE ZA VAKUFORM PROIZVODE

Preporučujemo slijedeće za održavanje naših proizvoda:

1. Proizvodi se mogu ručno oprati do 60°C.
2. Proizvodi se mogu dezinficirati standardnim dezinfekcijskim sredstvima.
3. Nakon pranja, neka se proizvodi posuše na zraku.

NAPOMENA:

Površina materijala naših Vakuform proizvoda može se oštetiti vatrom ili šiljastim predmetima, što će uzrokovati gubitak čvrstoće materijala. Za takvu štetu ne preuzimamo odgovornost.

Nemojte stavljati proizvode u perilicu rublja, sušilicu rublja ili ih izložiti prevelikoj toplini.

Ističemo da - zbog svoje fizičke prirode - utjecaj prevelike topline može uzrokovati omekšavanje presvlake (npr. tijekom ljeta držanjem neko vrijeme u zatvorenom automobilu ili izravnim dugotrajnim izlaganjem suncu).

U ekstremnim slučajevima to može uzrokovati gubitak inherentne stabilnosti. Takav oblik gubitka ne odnosi se na zamor ili oštećenje materijala. Snažno povećanje temperature uzrokuje širenje podstave (punjenje proizvoda), kao i zraka koji ostaje u sustavu. Time se može dogoditi omekšavanje materijala. Čim se temperatura opet spusti, sustav se spaja s izvornom konzistencijom.

Kako bi se izbjegla neželjena promjena u obliku, preporučujemo da sustav ne izlažete ekstremnoj toplini tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Ipak, ako dođe do promjena u omjerima tlaka sustava kao što je gore opisano, oni se lako mogu ponovno namjestiti pomoću pumpe za ispuštanje zraka.

Nemojte bez nadzora upuhivati zrak u presvlaku pomoću električne pumpe. Stalni dovod zraka može napuhati presvlaku toliko da se ljepljeni šavovi rastrgnu.

Izrađeno u Njemačkoj

Proizvodimo ručno naše proizvode za Vas u našoj radionici.

Za ovaj proces koristimo isključivo visoko kvalitetne materijale, uglavnom od njemačkih dobavljača.

Stoga jamčimo stalnu kvalitetu proizvodnje na najvišoj razini.

Vaš **VAKUFORM**® Tim



Vacuum- and aircushion technology
Weiterstädter Landstraße 13
64291 Darmstadt
GERMANY
Phone.: +49 (0) 61 51 – 9 18 36 10
Fax: +49 (0) 61 51 – 9 18 36 20
Mail: info@vakuform-reha.de
Home: vakuform-reha.de