



Reinigen  
Cleaning  
Nettoyage  
Pulizia  
Limpieza  
Reinigen  
Rengöra  
Puhdistaminen  
Rengjøring  
Rengjøring

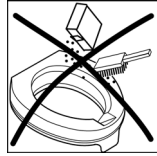

Ohne Scheuermittel reinigen  
Clean without scouring agent  
Ne pas utiliser de produits récurrents pour le nettoyage  
Non pulirlo con prodotti abrasivi  
No utilizar productos abrasivos para su limpieza  
Zonder schuurmiddelen reinigen  
Använd inte skurmedel  
Puhdista ilman hankausaineita  
Bruk ikke skuremiddel ved rengjøring  
Rengør uden skuremiddel

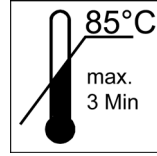

Reinigungstemperatur max. 85 °C  
Max. cleaning temperature: 85 °C  
Température de nettoyage 85 °C max.  
Temperatura max. durante la pulizia 85 °C  
Temperatura máx. de limpieza 85 °C  
Reinigungstemperatuur max. 85 °C  
Rengjøringstemperatur max 85 °C  
Puhdistuslämpötila maks. 85 °C  
Temperatur ved rengjøring maks. 85 °C  
Rengjøringstemperatur maks. 85 °C



Von Hand reinigen  
Clean by hand  
Nettoyage à la main  
Pulizia a mano  
Limpiar a mano  
Handmatig reinigen  
Rengör för hand  
Puhdista käsin  
Rengjør for hånd  
Rengør manuelt



**Toilettensitzerhöhung**  
Gebrauchsanweisung

**Raised toilet seat**  
Operating instructions

**Rehause WC**  
Mode d'emploi

**Rialzo per WC**  
Istruzioni per l'uso

**Alzador del asiento del inodoro**  
Manual de instrucciones

**Toiletbrilverhoging**  
Gebruiksaanwijzing

**AQUATEC**  
900

**Toalettstolsförhöjare**  
Bruksanvisning

**WC-istuimen korotus**  
Käyttöohje

**Toalettseteforhøyelse**  
Bruksanvisning

**Toiletforhøjelse**  
Betjeningsvejledning

D

**AQUATEC GmbH**  
Alemanenstr. 10  
D-88316 Isny  
Telefon 07562 700-0  
Telefax 07562 700-66  
E-Mail info@aquatec.de  
Internet www.aquatec.de

CH

**MOBITEC Rehab AG**  
Bahnhofstrasse 3  
CH-5436 Würenlos  
Telefon 05640 1520-0  
Telefax 05640 1520-1  
E-Mail office@mobitec-rehab.ch  
Internet www.mobitec-rehab.ch

A

**MOBITEC**  
Mobilitätshilfen GmbH  
Herzog Odilostraße 101  
A-5310 Mondsee  
Telefon 06232 5535-00  
Telefax 06232 5535-4  
E-Mail mobitec@nexta.at

FIN

**Algol Oy**  
Karapellontie 6  
P.O. Box 13  
02611 Espoo  
Puhelin 09 50991  
Fax 09 595 006  
E-mail info@algol.fi  
Internet www.algol.fi

F

**Invacare® Poirier S.A.S.**  
Route de St Roch  
F-37230 Fondettes  
Téléphone 0247 626466  
Téléfax 0247 421224  
E-mail contactfr@invacare.com  
Internet www.invacare.fr

DK

**NEBA AS**  
Baldersbuen 17, Box 220  
DK-2640 Hedehusene  
Telefon 046 59 01 77  
Telefax 046 59 01 97  
E-mail neba@neba.dk  
Internet www.neba.dk

S

**DOLOMITE AB**  
Box 55, V. Götgatan 5  
S-33421 Anderstorp  
Telefon 0371 588400  
Telefax 0371 17090  
E-Post info@dolomite.se  
Hemsida www.dolomite.se

CDN

**Invacare® CANADA INC.**  
570 Matheson Blvd. E., Unit 8  
CDN Mississauga  
On. L4Z 4G4  
Telephone 0905 8908300  
Telefax 0905 8905244  
Internet www.invacare.ca

E

**Invacare® S.A.**  
c/Areny  
s/n - Poligon Industrial de Celrà  
E-17460 Celrà (Girona)  
Telefono 972 493200  
Telefax 972 493220  
E-mail contactsp@invacare.com  
Internet www.invacare.es

N

**Invacare® AS**  
Grensesvingen 9  
N-0603 Oslo  
Telefon 22 57 95 00  
Telefax 22 57 95 01  
E-mail norway@invacare.com  
Hjemmeside www.invacare.no

GB

**Invacare® Ltd**  
South Road  
Bridgend Industrial Estate  
Bridgend  
CF31 3PY  
Telephone 01656 753200  
Telefax 01656 667532  
E-mail uk@invacare.com  
Internet www.invacare.co.uk

USA

**CLARKE HEALTH CARE PRODUCTS Inc.**  
1003 International Dr.  
USA-Oakdale, PA 15071-9226  
Telephone 0724 69 52 122  
Telefax 0724 69 52 922  
E-mail info@clarkehealthcare.com  
Internet www.clarkehealthcare.com

I


**Invacare® Mecc San**  
Via dei Pini, 62  
I-36016 Thiene (VI)  
Telefono 0445 380059  
Telefax 0445 380034  
E-mail italia@invacare.com  
Internet www.invacare.it

NL

**RvS Nederland**  
Bolderweg 6  
NL-1332 Almere  
Telefoon 036 532 04 50  
Fax 036 532 13 08  
E-Mail info@rvsnederland.nl  
Internet www.rvsnederland.nl




AQT00193

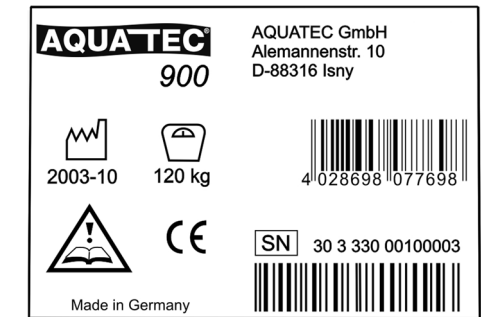

AQT00333

**Sicherheitshinweise**  
Safety instructions  
Consignes de sécurité  
Indicazioni di sicurezza  
Indicaciones de seguridad  
Veiligheidsinstructies  
Säkerhetsanvisningar  
Turvaohjeet  
Sikkerhetshenvisninger  
Sikkerhedshenvisninger

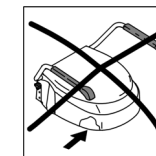

Bei Defekt nicht verwenden  
Do not use if defective  
Ne pas utiliser en cas de défaut  
Non impiegarlo se difettoso  
No utilizar en malas condiciones  
Indien defect niet gebruiken  
Använd inte produkten om den är trasig  
Älä käytä viallista tuotetta  
Må ikke brukes når den er defekt  
Må ikke anvendes, hvis den er defekt



Ausrichtung beachten  
Observe the alignment  
Respecter le positionnement  
Prestare attenzione all'allineamento  
Preste atención a la alineación  
Op correcte plaatsing letten  
Beakta placeringen  
Huomatkaa kohdistus  
Vær oppmerksom på opprettingen  
Vær opmærksom på placeringen



Max. Belastung  
Max. load  
Charge max.  
Portata max.  
Carga máx.  
Max. belasting  
Max. belastning  
Maks. kuormitus  
Maks. belastning  
Maks. belastning





Klemmgefahr  
Risk of catching  
Risque de pincement  
Pericolo di incastro  
Peligro de pillarse la mano  
Beknellingsgevaar  
Risk för klämskador  
Rusementuvaara  
Klemfare  
Fare for at komme i klemme





Absturzgefahr  
Danger of falling  
Risque de chute  
Pericolo di caduta  
Peligro de caída  
Gevaar voor vallen  
Risk att ramla  
Putoamisvaara  
Fare for å falle  
Fare for at falde ned


Lieferumfang  
 Scope of delivery  
 Volume de livraison  
 Fornitura  
 Volumen de entrega  
 Omvang van de levering  
 Leveransomfatning  
 Toimituskokonaisuus  
 Leveringsomfang  
 Indeholdt i leveringen





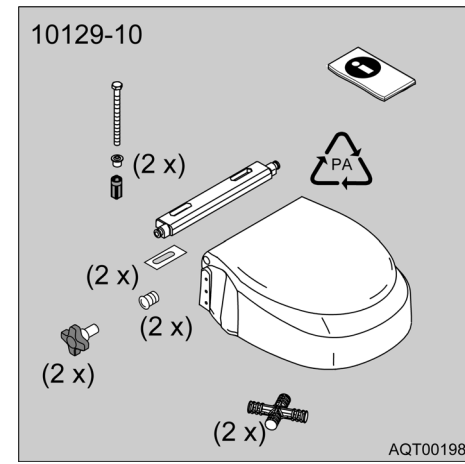
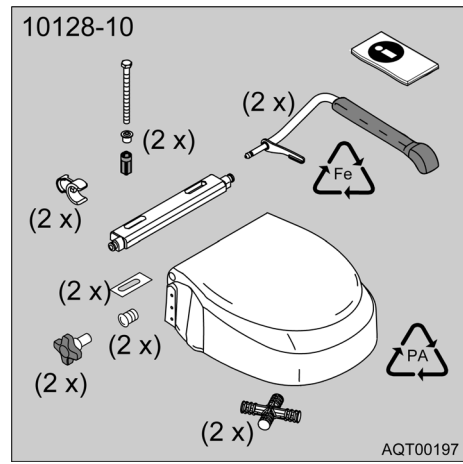


Montieren  
 Mounting  
 Montage  
 Montaggio  
 Montar  
 Monteren  
 Montering  
 Asennus  
 Monterung  
 Monterung

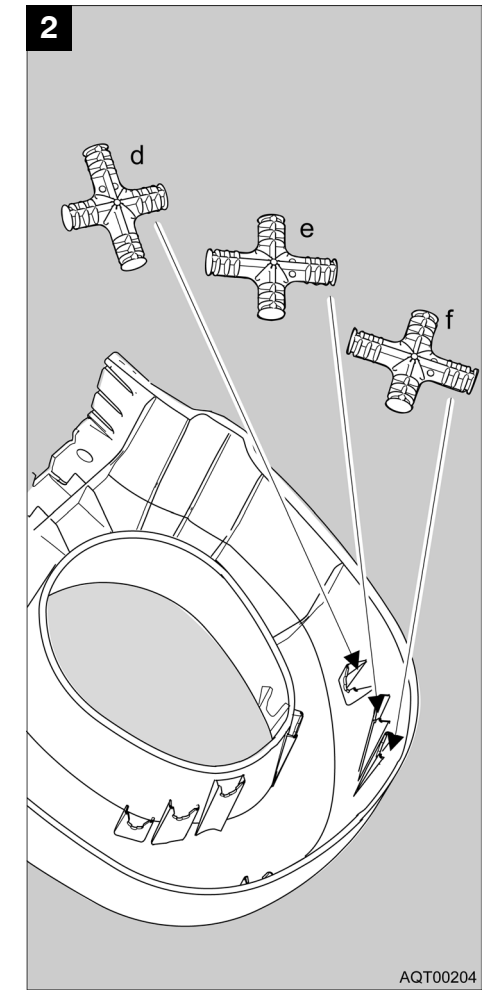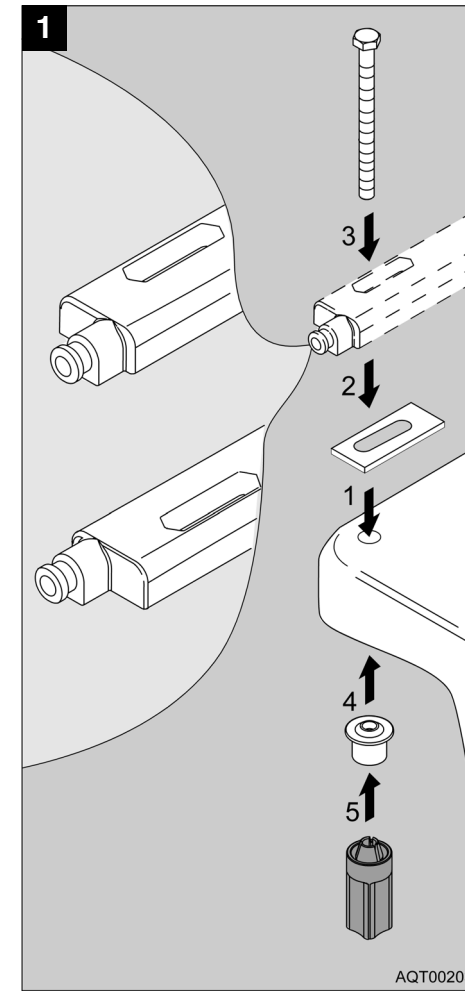

Montagemöglichkeiten  
 Mounting options  
 Possibilités de montage  
 Possibilità di montaggio  
 Posibilidades de montaje  
 Montagemogelijkheden  
 Montagemöjligheter  
 Asennusmahdollisuudet  
 Montasjemuligheter  
 Monteringsmuligheder

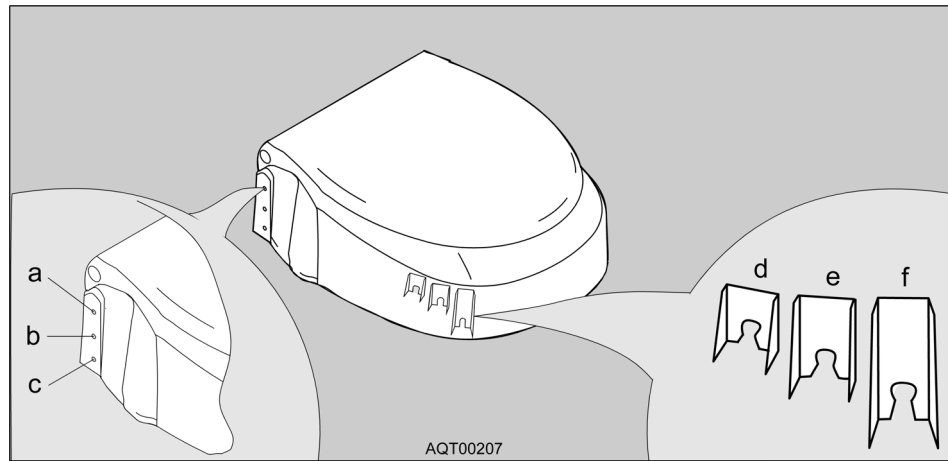

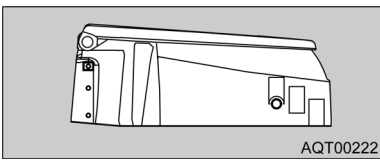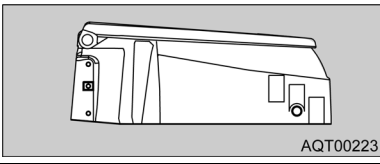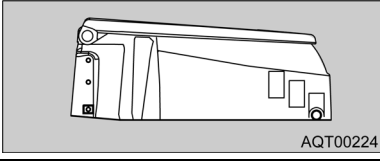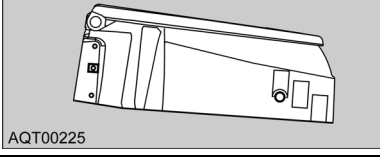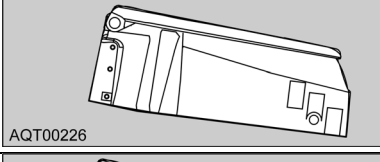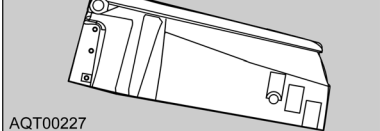I 6 cm	 AQT00222	a + d
I 10 cm	 AQT00223	b + e
I 15 cm	 AQT00224	c + f
∠ 8°	 AQT00225	b + d
∠ 11°	 AQT00226	c + e
∠ 18°	 AQT00227	c + d

